

# Verstelloptionen


Primo Amico II / Primo Amico Ratio II




## Sitzhöhe 42 cm



Vorderrad in oberster Position

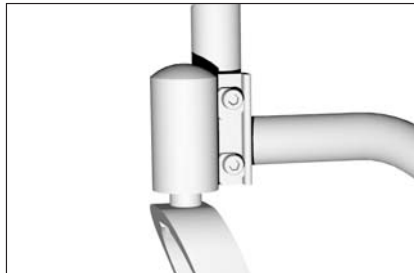

Gabel in oberer Position

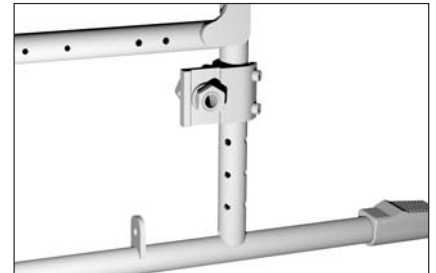


Adapterplatte in Loch 4 und 5


## Sitzhöhe 45 cm



Vorderrad in unterster Position

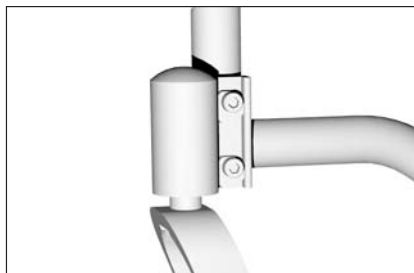

Gabel in oberer Position

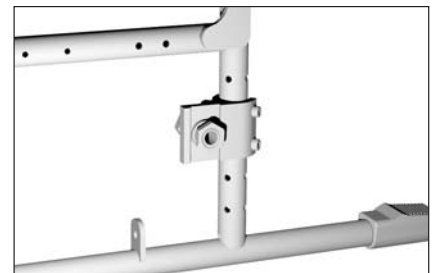


Adapterplatte in Loch 3 und 4


## Sitzhöhe 48 cm



Vorderrad in oberster Position

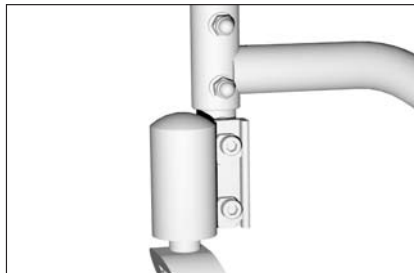

Gabel in unterer Position

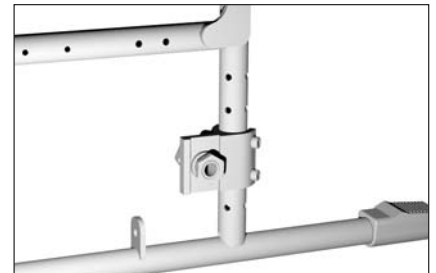


Adapterplatte in Loch 2 und 3


## Sitzhöhe 51 cm (werkseitig geliefert)



Vorderrad in unterster Position

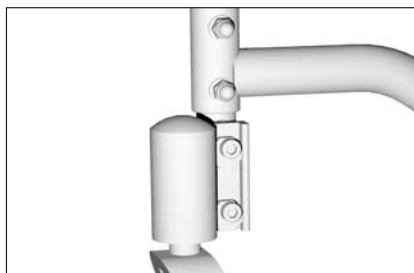


Gabel in unterer Position

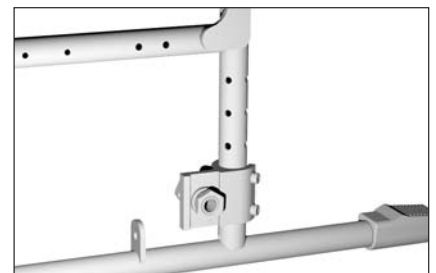

Adapterplatte in Loch 1 und 2

## Radstandverlängerung

Für eine Radstandverlängerung von 3 cm einfach die Adapterplatte nach hinten drehen und verschrauben.

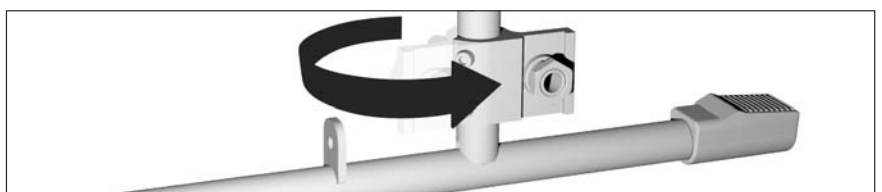

Lesen Sie zuerst die Anleitung und beginnen Sie dann mit der Montage der Sitzhöhen und der Radstandverlängerung des Rollstuhles.