

# Gebrauchsanweisung

Duschoilettenstuhl  
Duschoiletten-Rollstuhl

**DTS XXL**  
**DTRS XXL**



**DTS XXL**



**DTRS XXL**

**DIETZ**<sup>®</sup>  
REHA-PRODUKTE

**XXLREHAB**<sup>®</sup>

Descostrasse 10  
D-76307 Karlsbad-Iltersbach  
Tel. +49 (0) 7248/ 9186 - 0  
Fax. +49 (0) 7248/ 9186 - 86





Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4

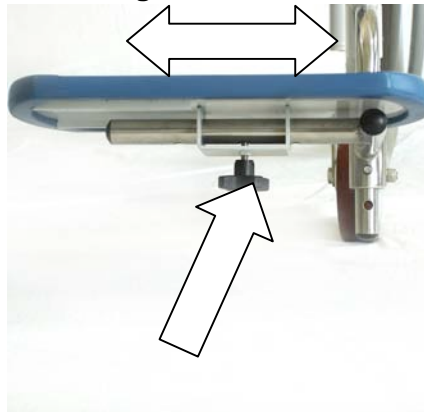


Abbildung 5

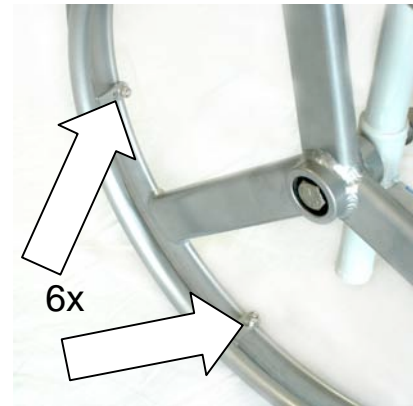


Abbildung 6



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9: geöffnet



Abbildung 10: gebremst



Abbildung 11

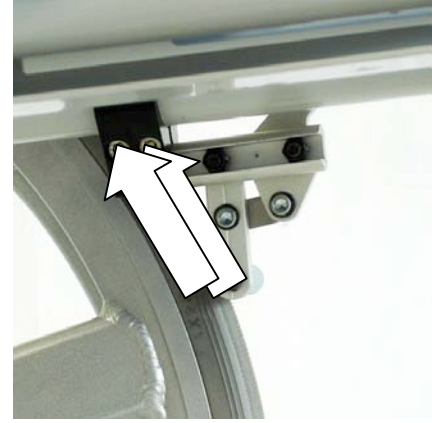


Abbildung 12

## Inhalt

<b>Allgemeine Informationen</b> .....	<b>5</b>
Vorbemerkungen.....	5
Konformitätserklärung.....	5
Zweckbestimmung.....	5
Indikation.....	6
Kontraindikation.....	6
Zeichen und Symbole.....	6
Haftung.....	6
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>7</b>
<b>Produkt- und Lieferübersicht</b> .....	<b>8</b>
Prüfung der Lieferung.....	8
Kennzeichnung und Typenschilder.....	8
Ausstattung des DTS XXL.....	9
Ausstattung des DTRS XXL.....	9
<b>Gebrauchszustand herstellen</b> .....	<b>10</b>
Seitenteile (Abbildung 1).....	10
Sitzpolster (Abbildung 2).....	10
Fußstützen (Abbildung 3).....	10
<b>Grundeinstellungen</b> .....	<b>10</b>
Unterschenkellänge (Abbildung 4).....	10
Fußplatten (Abbildung 5).....	10
Greifreifen (Abbildung 6).....	10
<b>Benutzung Ihres Duschtoilettenstuhls</b> .....	<b>11</b>
Ein- und Aussteigen.....	11
<i>Ein- und Aussteigen von der Seite</i> .....	11
<i>Ein- und Aussteigen von vorn</i> .....	11
Die Fußstützen abschwanken und Abnehmen (Abbildung 3).....	11
Die Seitenteile abnehmen (Abbildung 7).....	11

<b>Schieben und Bremsen .....</b>	<b>12</b>
<i>Schieben und Bremsen durch einen Begleiter.....</i>	<i>12</i>
<i>Selbständiges Fahren und Bremsen (DTRS XXL).....</i>	<i>12</i>
<i>Feststellbremse (DTS XXL) (Abbildung 8).....</i>	<i>12</i>
<i>Feststellbremse (DTRS XXL) (Abbildung 9)(Abbildung 10) .....</i>	<i>13</i>
<b>Benutzung als Toilettenstuhl (Abbildung 11).....</b>	<b>13</b>
<b>Benutzung als Duschstuhl .....</b>	<b>13</b>
<b>Einstellungen .....</b>	<b>13</b>
<b>Feststellbremse (DTRS XXL) (Abbildung 9)(Abbildung 12) .....</b>	<b>14</b>
<b>Pflegehinweise für den Benutzer .....</b>	<b>14</b>
<b>Reinigung.....</b>	<b>14</b>
<b>Weitergabe / Wiedereinsatz.....</b>	<b>14</b>
<b>Überprüfung des Rollstuhles durch den Benutzer .....</b>	<b>14</b>
<b>Wartungshinweise für den Fachhandel.....</b>	<b>15</b>
<b>Entsorgung.....</b>	<b>15</b>
<b>Technische Daten .....</b>	<b>16</b>
<b>Wartungsprotokoll.....</b>	<b>17</b>
<b>Garantie .....</b>	<b>18</b>

## **Allgemeine Informationen**

### **Vorbemerkungen**

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für einen Rollstuhl aus unserem Hause entschieden haben.

Das Design, die Funktionalität und die Qualität dieser modernen Rollstühle werden Sie nicht enttäuschen.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch. Sie erhalten wichtige Sicherheitshinweise und wertvolle Tipps zur richtigen Benutzung und Pflege des Rollstuhles. Wenn Sie Fragen haben oder zusätzliche Informationen benötigen, wenden Sie sich an den Fachhändler, der Ihnen den Rollstuhl geliefert hat.

Diese Gebrauchsanweisung enthält alle notwendigen Hinweise für die Anpassung und Bedienung des Duschoilettenstuhls DTS XXL und des Duschoiletten-Rollstuhls DTRS XXL. Beide Duschoilettenstühle sind hinsichtlich ihres Aufbaus sehr ähnlich. So wird im weiteren Verlauf der Gebrauchsanweisung auf Besonderheiten der jeweiligen Version gesondert eingegangen. Der mit Greifreifen ausgestattete DTRS XXL ist zum selbst Fahren und Schieben geeignet. Der DTS XXL überzeugt durch sein geringes Eigengewicht.

Beide Duschoilettenstühle punkten durch ihre extreme Belastbarkeit, bedingt durch ein ausgeklügeltes Design und die Verwendung moderner Materialien. Der aus CroMo Stahl bestehende Rahmen zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und seine außergewöhnlich hohe Belastbarkeit aus.

### **Konformitätserklärung**

Für den Duschoilettenstuhl DTS XXL und den Duschoiletten-Rollstuhl erklärt die Dietz GmbH in alleiniger Verantwortung die Konformität gemäß der EG-Richtlinie 93/42, für Medizinprodukte.

### **Zweckbestimmung**

Der Duschoilettenstuhl findet seine Anwendung im häuslichen und im stationären Bereich. Er dient bei physischer Funktionseinschränkung der Erhöhung der Selbständigkeit bei der Toiletten- oder Duschbenutzung. Der Duschoilettenstuhl ist ausschließlich für den Innenbereich und einer max. Benutzerlast von 325 kg konzipiert.

## **Indikation**

Gehunfähigkeit bzw. stark ausgeprägte Gehbehinderung durch

- Lähmung
- Gliedmaßenverlust
- Gliedmaßendefekt / -deformation
- Sonstige Erkrankungen.



Zudem ist die Versorgung mit dem Duschoilttenstuhl dann angezeigt, wenn Behinderte die vorhandene Badewanne und/oder Dusche, ggf. auch mit einer Bade- oder Duschhilfe nicht nutzen können. Auch wenn das Benutzen oder Erreichen der Toilette aufgrund der Behinderung nicht möglich ist, kann der Duschoilttenstuhl zusätzlich aufgrund der gepolsterten Sitz-, Rücken- und Armlehnen als Sitzgelegenheit verwendet werden.

## **Kontraindikation**

Die Verwendung des Rollstuhles ist ungeeignet bei

- Sitzunfähigkeit
- Wahrnehmungsstörungen
- Starke Gleichgewichtsstörungen.

## **Zeichen und Symbole**

	Achtung! Bezeichnet besonders sicherheitsrelevante Hinweise. Bedienungsanleitung beachten!
	Wichtig! Bezeichnet besonders nützliche Informationen im jeweiligen Sachzusammenhang.

## **Haftung**

Die Firma Dietz GmbH haftet nur, wenn die Produkte unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgegebenen Zwecken eingesetzt werden. Wir empfehlen die Produkte sachgemäß zu handhaben und entsprechend der Anleitung zu pflegen. Für Schäden, die durch Bauteile und Ersatzteile verursacht werden, die nicht durch die Dietz GmbH freigegeben wurden, haftet die Dietz GmbH nicht. Reparaturen sind nur von autorisierten Fachhändlern oder vom Hersteller selbst durchzuführen.

## Sicherheitshinweise

Um Stürze und gefährliche Situationen zu vermeiden, sollten Sie den Umgang mit Ihrem neuen Rollstuhl erst auf ebenem, überschaubarem Gelände üben. Eine Begleitperson ist in diesem Fall empfohlen.

- Lassen Sie Kinder und Jugendliche niemals unbeaufsichtigt im Duschoilettenstuhl zurück.
- Vor Anwendung des Duschoilettenstuhls kontrollieren Sie bitte, ob alle angebauten Teile ordentlich befestigt sind.
- Üben Sie vor der ersten Benutzung das Schieben auf ebenem und überschaubarem Gelände, sowie die Funktionsweise der Sitzneigungsverstellung und Bremsfeststeller.
- Sichern Sie den Duschoilettenrollstuhl stets gegen Wegrollen. Auch bei Nichtgebrauch.
- Der Duschoilettenstuhl darf nicht zum Transport mehrerer Personen oder Lasten missbraucht werden. Beachten Sie die Zweckbestimmung.
- Bitte beachten Sie, dass sich bei Gewichtsverlagerung durch Körperbewegung, Verstellung der Sitzneigung oder Beladung des Rollstuhles das Kipprisiko vergrößern kann.
- Zur Überwindung von Hindernissen, wie Stufen oder Absätzen, verwenden Sie bitte unbedingt Auffahrampen.
- Vermeiden Sie ein ungebremstes Schieben gegen ein Hindernis (Stufe, Kanten), der Insasse könnte nach vorn herausfallen.
- Beim Ein- und Aussteigen niemals auf die Fußplatten stellen.
- Verwenden Sie keine Hochdruckreinigungsgeräte oder scharfe, ätzende Chemikalien zur Reinigung.
- Der Duschoilettenstuhl darf nur im Innenbereich auf ebenem festem Untergrund verwendet werden.
- Bitte beachten Sie, dass sich Polsterteile, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, aufheizen und bei Berührung Hautverletzungen verursachen können. Decken Sie daher diese Teile ab oder schützen Sie den Rollstuhl vor Sonneneinstrahlung.

- Der Duschoilettenstuhl darf nicht zum Transport mehrerer Personen oder Lasten missbraucht werden. Beachten Sie die Zweckbestimmung.
- Benutzen Sie den Rollstuhl niemals unter Einfluss von Alkohol oder anderen Mitteln, die die Aufmerksamkeit bzw. die körperliche und geistige Aufnahmefähigkeit beeinflussen.
- Der Rollstuhl ist nicht als Sitz in Fahrzeugen, wie Behindertentransportwagen (BTW) freigegeben!

### **Produkt- und Lieferübersicht**

#### **Prüfung der Lieferung**

Der Rollstuhl ist komplett in Karton verpackt. Bitte bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit auf, sie dient zur evtl. späteren Einlagerung des Rollstuhles.

Nach Erhalt der Ware prüfen Sie bitte umgehend den Inhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Der Inhalt besteht aus:

- 1 Umverpackung
- 1 Rollstuhl vormontiert
- 1 paar Beinstützen
- 1 Gebrauchsanweisung
- 1 Satz Werkzeug


#### **Kennzeichnung und Typenschilder**

Typen- und Herstellerschild sind am Rahmen unter dem Sitz angebracht.



Schilder müssen lesbar bleiben. Unlesbare oder fehlende Schilder unverzüglich ersetzen. Das Typenschild ist für die Identifizierung des Produktes sehr wichtig. Es darf nicht entfernt werden.

### Ausstattung des DTS XXL

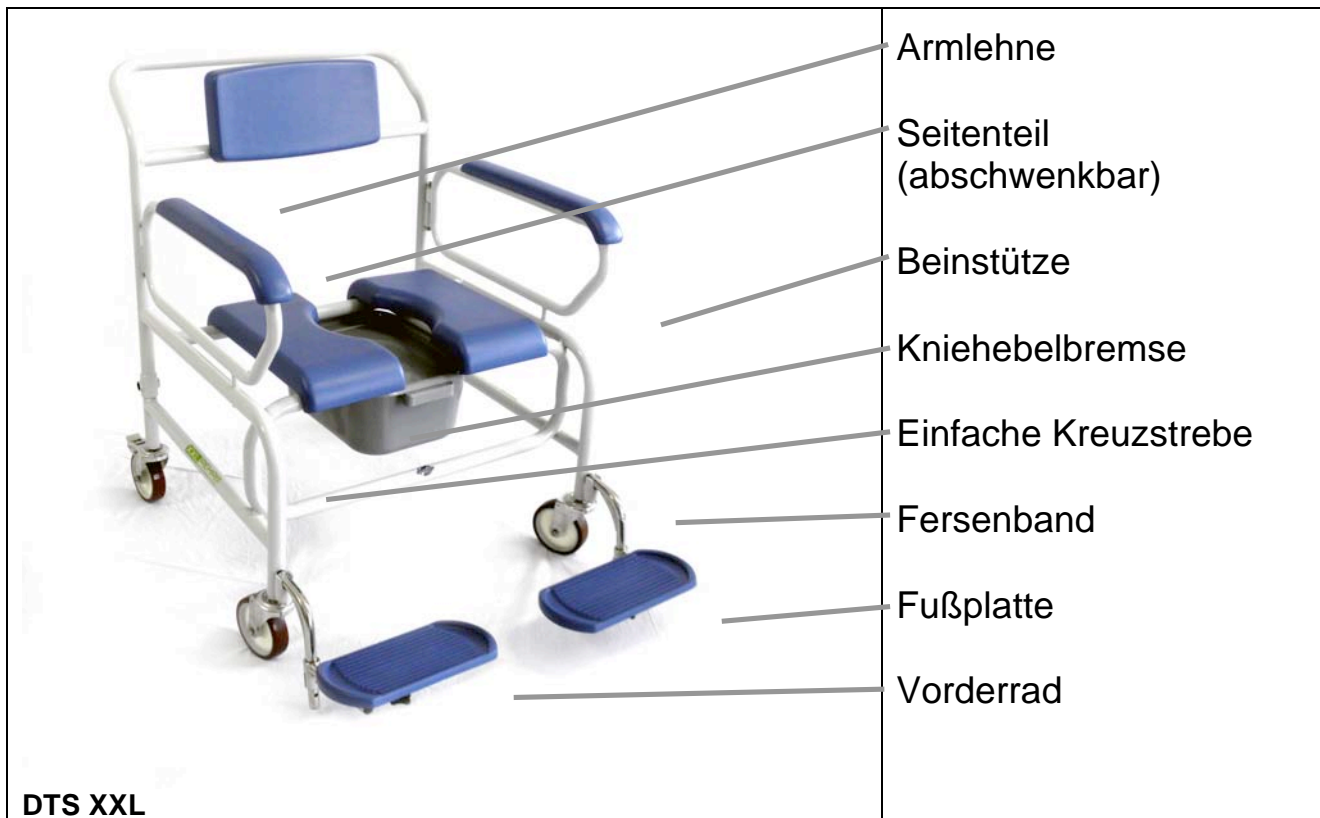

### Ausstattung des DTRS XXL



## **Gebrauchszustand herstellen**

Ihr Rollstuhl wird in der Regel komplett montiert angeliefert. Um ihn gebrauchsfertig zu machen, genügen einige einfache Handgriffe.



**Klemmgefahr!**

Achten Sie beim Falten und Aufstellen des Rollstuhles auf Ihre Finger und greifen Sie nur an die dargestellten Teile.

### **Seitenteile (Abbildung 1)**

Drücken Sie auf den Druckknopf und schieben Sie das Seitenteil in die dafür vorgesehenen Aussparungen. Das Seitenteil arretiert automatisch

### **Sitzpolster (Abbildung 2)**

Drücken Sie die beiden Sitzpolster fest in die Aufnahmen im Sitzgestell.

### **Fußstützen (Abbildung 3)**

Die Fußstützen lassen sich leicht anbringen. Lassen Sie diese einfach in die Aussparungen rutschen. Gegebenenfalls müssen Sie leicht nachdrücken. Stellen Sie sicher, dass sie fest sitzen und nicht verrutschen.

## **Grundeinstellungen**

### **Unterschenkellänge (Abbildung 4)**

Die Unterschenkellänge kann in drei Stufen angepasst werden. Die Einstellung ist richtig, wenn bei aufliegenden Füßen auf der Fußplatte Ihre Oberschenkel waagrecht liegen.

Zum Einstellen, lösen Sie die Sechskantschraube und ziehen Sie heraus. Anschließend bringen Sie die Fußplatte in die für Sie angenehme Position. Befestigen Sie wieder die Schrauben und ziehen Sie sie wieder fest an.

### **Fußplatten (Abbildung 5)**

Die Fußplatten können in drei Stufen weiter nach innen bzw. nach außen verstellt werden. Lösen Sie dazu die Handschraube unter der Fußplatte und schieben sie die Fußplatte nach links bzw. rechts. Ziehen Sie anschließend die Handschraube wieder fest an.

### **Greifreifen (Abbildung 6)**

Der Greifreifen kann weiter innen bzw. außen angebracht werden. Lösen Sie dazu die sechs Befestigungsschrauben. Bringen Sie anschließend den Greifreifen in die gewünschte Position und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

## **Benutzung Ihres Duschoilettenstuhls**

### **Ein- und Aussteigen**

#### ***Ein- und Aussteigen von der Seite***

Der Duschoilettenstuhl bietet Ihnen die Möglichkeit, auf einfache Weise ein- bzw. auszusteigen. Die Fußstützen sind abschwenkbar und abnehmbar. Die Seitenteile sind abnehmbar.

Bringen Sie den Duschoilettenstuhl und die gegenwärtige oder künftige Sitzfläche möglichst dicht seitlich zueinander.

Betätigen Sie die Feststellbremsen des Duschoilettenstuhls und ggf. der anderen Sitzgelegenheit.

Schwenken Sie die Fußstützen nach hinten bzw. nehmen Sie sie ab. Nehmen Sie das Seitenteil ab.

Rutschen Sie nun seitlich auf die Sitzfläche.

Achten Sie bitte darauf, dass Sie so weit wie möglich hinten im Sitz sitzen.

Anschließend schwenken Sie das Seitenteil und die Fußstützen wieder in Ihre Ausgangsposition.

#### ***Ein- und Aussteigen von vorn***

Nehmen Sie die Fußstützen ab oder schwenken Sie sie weg.

Bringen Sie den Duschoilettenstuhl und die gegenwärtige oder künftige Sitzfläche möglichst dicht frontal zueinander heran.

Betätigen Sie die Feststellbremsen des Duschoilettenstuhls und ggf. der anderen Sitzgelegenheit.

Nun rutschen Sie durch eine Körperdrehung auf die Sitzfläche. Achten Sie bitte darauf, dass Sie so weit wie möglich hinten im Sitz sitzen.

Anschließend befestigen Sie die Fußstützen wieder in die Mitte und legen Sie Ihre Füße darauf ab.

### **Die Fußstützen abschwenken und Abnehmen (Abbildung 3)**

Ziehen Sie die Fußstützen etwas aus der Verankerung. Anschließend können Sie sie zur Seite schwenken. Zum Abnehmen ziehen Sie einfach die Fußstützen heraus.

### **Die Seitenteile abnehmen (Abbildung 7)**

Betätigen Sie den Druckknopf und ziehen Sie das Seitenteil nach oben heraus.

## Schieben und Bremsen

### ***Schieben und Bremsen durch einen Begleiter***

Der Begleiter treibt den Duschoilettenstuhl durch Schieben an den dafür vorgesehenen Schiebegriffen an.



Wichtig!

Der Begleiter muss physisch und psychisch dazu in der Lage sein, den Duschoilettenstuhl aus eigener Kraft zu bremsen. Als Parkbremse steht die Feststellbremse zur Verfügung.

### ***Selbständiges Fahren und Bremsen (DTRS XXL)***

Führen Sie Ihre ersten Fahrversuche vorsichtig auf ebenem Gelände mit Unterstützung eines Helfers durch, bis Sie sich an Ihren neuen Duschoilettenstuhl gewöhnt haben. Besonders vorsichtig müssen Sie beim Fahren an Steigungen und Gefällen oder beim Überwinden von Hindernissen sein.

Der Duschoiletten-Rollstuhl wird über die Greifreifen angetrieben und abgebremst. Dabei wird die Hand auf den Greifring gelegt, wobei nur der Daumen und der gebeugte Zeigefinger den Greifring berühren. Die anderen Finger werden zu einer Faust geschlossen und berühren den Greifring nicht.

Zum Abbremsen sollten Sie den Greifring zwischen den Daumen und den gebeugten Zeigefingern gleiten lassen und durch dosiertes Zufassen bis zum Stillstand abbremsen.



Achtung!

Achten Sie beim Antreiben des Duschoiletten-Rollstuhls darauf, dass Sie dabei nicht die Reifendecke mit dem Daumen berühren.

Klemmgefahr zwischen Reifen und Seitenteil/Armauflage!

Zum Lenken des Duschoiletten-Rollstuhls wird der Greifring an der Seite abgebremst, zu welcher man lenken oder drehen möchte.

Zum Drehen auf der Stelle schiebt die eine Hand vorwärts und die andere Hand gleichzeitig rückwärts.

### ***Feststellbremse (DTS XXL) (Abbildung 8)***

Der DTS ist mit vier Schwenkrollen ausgestattet. Die beiden hinteren sind als Totalfeststeller ausgeführt. D.h. nach Betätigung sind die Rollen gebremst und gegen verdrehen gesperrt. Zum Betätigen und Lösen der Bremse treten Sie auf den Wipphebel.

### **Feststellbremse (DTRS XXL) (Abbildung 9)(Abbildung 10)**

Die Feststellbremse ermöglicht es dem Benutzer den Rollstuhl sicher zu parken. Betätigen Sie die Feststellbremse (Reifenbremse) nur im Stillstand. Drücken Sie den Hebel dafür nach vorn, bis er selbstständig hält. Nun steht der Rollstuhl sicher, Sie können jetzt Umsetzen oder einfach nur Parken. Sie lösen die Feststellbremse durch Zurückziehen des Hebels.

### **Benutzung als Toilettenstuhl (Abbildung 11)**

Betätigen Sie zuerst die Feststellbremsen. Zur Benutzung als Toilettenstuhl platzieren Sie den Eimer ohne Deckel unter dem Sitz.

Nach der Benutzung ziehen Sie den Eimer zum Leeren nach hinten heraus und verschließen ihn mit dem Deckel. Nach dem Entleeren Eimer und Sitzauflage wie vorgeschrieben reinigen (siehe Kapitel Reinigen).



Verletzungsgefahr durch Einklemmen! Den Eimer nicht herausziehen, solange die Person noch auf dem Toilettenstuhl sitzt.



Der Toilettenstuhl kann mit einem herkömmlichen WC benutzt werden

Ziehen Sie zunächst den Eimer nach hinten heraus. Klappen Sie den Deckel des WC zurück und fahren Sie über das WC. Betätigen Sie dann die Feststellbremsen.

### **Benutzung als Duschstuhl**

Betätigen Sie zuerst die Feststellbremsen. Zur Benutzung als Duschstuhl entnehmen Sie den Toiletteneimer, ziehen Sie den Eimer dazu nach hinten heraus.

## **Einstellungen**

Die Einstellungen an der Bremse sollten von geschulten Fachleuten durchgeführt werden. Wenn Sie jedoch über ausreichende Erfahrung verfügen, können Sie diese Arbeit auch selbst ausführen.



Achtung! Falsch eingestellte Bremsen können lebensbedrohliche Folgen haben.

### **Feststellbremse (DTRS XXL) (Abbildung 9)(Abbildung 12)**

Der Abstand zwischen Bremsbolzen und Reifendecke muss bei max. geöffnetem Bremsmechanismus an der engsten Stelle 12-14 mm betragen.

Zum Einstellen/Korrigieren des Abstandes lösen Sie die Schrauben. Schieben Sie dann die Bremsen in die korrekte Position. Ziehen Sie anschließend die Schrauben wieder fest und prüfen Sie die Funktion der Bremse. Der Duschoiletten-Rollstuhl sollte bei betätigter Bremse nicht verschiebbar sein.

### **Pflegehinweise für den Benutzer**

#### **Reinigung**

- Die Rahmenteile des Duschoilettenstuhls können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden.
- Die Räder können mit einer feuchten Bürste mit Kunststoffborsten gereinigt werden (keine Drahtbürste verwenden!).
- Die Polstermaterialien sind mit milder Seifenlauge bis 40°C waschbar und ggf. mit Desinfektionsmitteln auf alkoholischer Basis desinfizierbar.



Verwenden Sie keinen Hochdruck- oder Dampfreiniger!

#### **Weitergabe / Wiedereinsatz**

Bei der Weitergabe / Wiedereinsatz des Duschoilettenstuhls denken Sie bitte daran, sämtliche für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen dem neuen Nutzer zu übergeben.

Der Duschoilettenstuhl muss gereinigt, desinfiziert und durch den Fachhandel auf Schäden hin untersucht und freigegeben werden.

#### **Überprüfung des Rollstuhles durch den Benutzer**

Überprüfen Sie vor jedem Fahrtantritt

- die Reifen auf Unversehrtheit und ausreichenden Luftdruck (bei optionaler Luftbereifung). Prüfen Sie regelmäßig einmal im Monat die Profiltiefe der Reifen. Sie sollte mindestens 1 mm betragen. Defekte oder verschlissene Reifen müssen gewechselt werden.
- die Funktionstüchtigkeit der Bremsanlage. Bei betätigter Bremse sollte der Rollstuhl nicht wegzuschieben sein. Bei gelöster Bremse sollte der Rollstuhl leicht zu schieben sein. Sollten Sie ein ungewohntes Bremsverhalten bemerken, verständigen Sie sofort Ihren Fachhändler und ziehen Sie den Rollstuhl aus dem Verkehr.

- die Unversehrtheit und Sauberkeit der Sitz- und Rückenpolsterung. Sind diese verschmutzt, können Sie diese gemäß Reinigungshinweisen reinigen. Sind sie beschädigt, kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.
- alle beweglichen Teile auf Leichtgängigkeit und geräuscharmes Funktionieren. Quietschgeräusche deuten auf Beschädigungen hin und sollten vom Fachhändler überprüft werden.
- alle Schraub- und Nietverbindungen auf Unversehrtheit.

## Wartungshinweise für den Fachhandel

Wir empfehlen mindestens einmal im Jahr den gesamten Rollstuhl einer Inspektion durch den Fachhandel zu unterziehen. Bei Störungen oder Defekten am Rollstuhl ist dieser unverzüglich dem Fachhändler zur Instandsetzung zu übergeben.



Dem Fachhändler werden auf Anfrage die notwendigen Informationen und Unterlagen für Reparatur und Instandsetzung zur Verfügung gestellt.

Für Fragen steht Ihnen der Dietz Kundenservice unter der Rufnummer +49 (0) 7248/ 9186 - 0 zur Verfügung.



Verwenden Sie bitte das beiliegende Wartungsprotokoll um den Wartungsstatus des Rollstuhles im Überblick zu behalten.

## Entsorgung

Wenn Ihr Rollstuhl nicht mehr verwendet wird und entsorgt werden soll, erkundigen Sie sich bei ortsansässigen Entsorgungsunternehmen über die Vorschriften.

**Technische Daten**

	DTS XXL		DTRS XXL	
Bezeichnung	Duschoilettenstuhl		Duschoiletten-Rollstuhl	
Farbe	Weiß-Blau		Weiß-Blau	
Gesamtlänge cm	112	132	132	112
Gesamtbreite cm	67	87	97	77
Gesamthöhe cm	100	100	100	100
Sitzbreite cm	61	61	71	71
Sitztiefe cm	56	56	56	56
Sitzhöhe cm	55	55	55	55
Max. Belastbarkeit kg	325	325	325	325
Gewicht kg	25	28	31	28
Artikel-Nr. (Standard-Armlehnen)	12000	12002	12003	12001
Artikel-Nr. (Butterfly-Armlehnen)	12004	12006	12007	12005
Preis	Auf Anfrage			

Technische  
Änderungen  
vorbehalten

## Wartungsprotokoll

(Verwenden Sie nach Möglichkeit die am Seitenende angegebenen Wartungskürzel beim Ausfüllen der Spalte)

Wann													
Was													
Insassenbremshebel													
Schiebegriffe													
Seitenteil, komplett													
Sitzpolster													
Rückenpolster													
Vorder-/ Lenkräder													
Hinter-/ Antriebsräder													
Reifendruck <small>(wenn optional luftbereit)</small>													
Reifendecke													
Greifreifen													
Rahmen, allgemein													
Wer													

G = geprüft    E = ersetzt    R = repariert

## Garantie

Garantieleistungen beziehen sich auf alle Mängel des Produkts, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Zugang der Versandbereitschaftsanzeige, spätestens jedoch nach Auslieferung. Von der Gewährleistungspflicht ausgeschlossen sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Desgleichen gilt bei Verwendung von ungeeigneten Pflegemitteln, Schmierölen bzw. Fetten. Bei Beanstandungen ist der vollständig ausgefüllte Garantie-Abschnitt (siehe unten) mit einzureichen.

<

Garantie- Abschnitt	
Produkt:	Modellbezeichnung
	Seriennummer
Fachhändler:	Datum und Stempel
Senden an: <b>DIETZ</b> <sup>®</sup> REHA-PRODUKTE Descostrasse 10 D-76307 Karlsbad-Ittersbach	