

Gebrauchsanweisung

Vierfußgehilfe XXL



DIETZ[®]
REHA-PRODUKTE

XXL REHAB[®]

Descostrasse 10
D-76307 Karlsbad-Ittersbach
Tel. +49 (0) 7248/ 9186 - 0
Fax. +49 (0) 7248/ 9186 - 86



Inhalt

Allgemeine Informationen	3
Vorbemerkungen	3
Konformitätserklärung	3
Zweckbestimmung	3
Indikation	3
Kontraindikation	4
Zeichen und Symbole.....	4
Haftung.....	4
Sicherheitshinweise	4
Produkt- und Lieferübersicht	5
Prüfung der Lieferung	5
Kennzeichnung und Typenschilder	5
Grundeinstellungen.....	6
Höhenverstellung	6
Anpassen für Linkshänder und Rechtshänder.....	6
Benutzung	7
Transport und Zerlegen.....	7
Pflegehinweise für den Benutzer	8
Reinigung.....	8
Weitergabe / Wiedereinsatz	8
Überprüfung der Gehilfe durch den Benutzer	8
Wartungshinweise für den Fachhandel.....	8
Entsorgung.....	8
Technische Daten	9
Wartungsprotokoll	9
Garantie	10

Allgemeine Informationen

Vorbemerkungen

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für eine Gehhilfe aus unserem Hause entschieden haben.

Das Design, die Funktionalität und die Qualität dieses modernen Produktes werden Sie nicht enttäuschen.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch. Sie erhalten wichtige Sicherheitshinweise und wertvolle Tipps zur richtigen Benutzung und Pflege der Gehhilfe. Wenn Sie Fragen haben oder zusätzliche Informationen benötigen, wenden Sie sich an den Fachhändler, der Ihnen die Gehhilfe geliefert hat.

Diese Gebrauchsanweisung enthält alle notwendigen Hinweise für die Anpassung und Bedienung der Gehhilfe XXL. Der Gehhilfe punktet durch ihr ausgeklügeltes Design und die Verwendung moderner Materialien. Sie zeichnet sich durch das geringe Gewicht und die außergewöhnlich hohe Belastbarkeit aus.

Konformitätserklärung

Für die Gehhilfe XXL erklärt die Dietz GmbH in alleiniger Verantwortung die Konformität gemäß der EG-Richtlinie 93/42, für Medizinprodukte.

Zweckbestimmung

Die Gehhilfe XXL ist für den Innen- und Außenbereich konzipiert. Sie darf nur auf ebenem und festem Untergrund verwendet werden. Eine andere Verwendung, insbesondere z.B. als Hilfe bei Gebirgstouren ist bestimmungswidrig.

Die Gehhilfe ist auf eine maximale Belastung von 270 kg ausgelegt. Sie können diese Angabe auf der Kennzeichnung überprüfen.

Indikation

Gehunfähigkeit bzw. stark ausgeprägte Beeinträchtigung des Gehens durch



- Gehbehinderung
- Gleichgewichtsstörungen
- Starke Gangunsicherheit
- Lauftraining

Kontraindikation

Die Verwendung der Gehhilfe ist ungeeignet bei

- Gliedmaßenverlust an beiden Armen
- Gelenkkontrakturen / Gelenkschäden an beiden Armen

Zeichen und Symbole

	Achtung! Bezeichnet besonders sicherheitsrelevante Hinweise. Bedienungsanleitung beachten!
	Wichtig! Bezeichnet besonders nützliche Informationen im jeweiligen Sachzusammenhang.

Haftung

Die Firma Dietz GmbH haftet nur, wenn die Produkte unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgegebenen Zwecken eingesetzt werden. Wir empfehlen die Produkte sachgemäß zu handhaben und entsprechend der Anleitung zu pflegen. Für Schäden, die durch Bauteile und Ersatzteile verursacht werden, die nicht durch die Dietz GmbH freigegeben wurden, haftet die Dietz GmbH nicht. Reparaturen sind nur von autorisierten Fachhändlern oder vom Hersteller selbst durchzuführen.

Sicherheitshinweise

Um Stürze und gefährliche Situationen zu vermeiden, sollten Sie den Umgang mit Ihrer neuen Gehhilfe erst auf ebenem, überschaubarem Gelände üben. Eine Hilfsperson ist in diesem Fall empfohlen.

- Vor Benutzung der Gehhilfe kontrollieren Sie bitte, ob alle angebauten Teile ordentlich befestigt sind.
- Beachten Sie die erhöhte Klemmgefahr, bei Einstellungen und Verstellungen am der Gehhilfe.
- Bei Verstellungen der Höhe müssen die Druckknöpfe unbedingt wieder sichtbar aus den Bohrungen austreten, ansonsten besteht Sturzgefahr.
- Die Gehhilfe immer senkrecht und nicht zu weit vom Körper entfernt auf den Boden aufsetzen. Erst wenn alle vier Füße der Gehhilfe festen Halt haben, mit kleinen Schritten vorwärts bewegen.
- Seien Sie bei nassem oder vereistem Untergrund besonders vorsichtig, die Rutschgefahr ist deutlich erhöht.
- Die Gehhilfe ist nur für ebene, feste Untergründe geeignet, vermeiden Sie unbedingt lockere Böden, wie Kies, Sand oder Laub. Achten Sie auf Unebenheiten und Löcher im Boden.
- Verwenden Sie keine Hochdruckreinigungsgeräte oder scharfe, ätzende Chemikalien zur Reinigung.

Produkt- und Lieferübersicht

Prüfung der Lieferung

Die Gehhilfe ist komplett im Karton verpackt. Bitte bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit auf, sie dient zur evtl. späteren Einlagerung des Rollstuhles.

Nach Erhalt der Ware prüfen Sie bitte umgehend den Inhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Der Inhalt besteht aus:

- 1 Umverpackung
- 1 Gehhilfe vormontiert
- 1 Gebrauchsanweisung

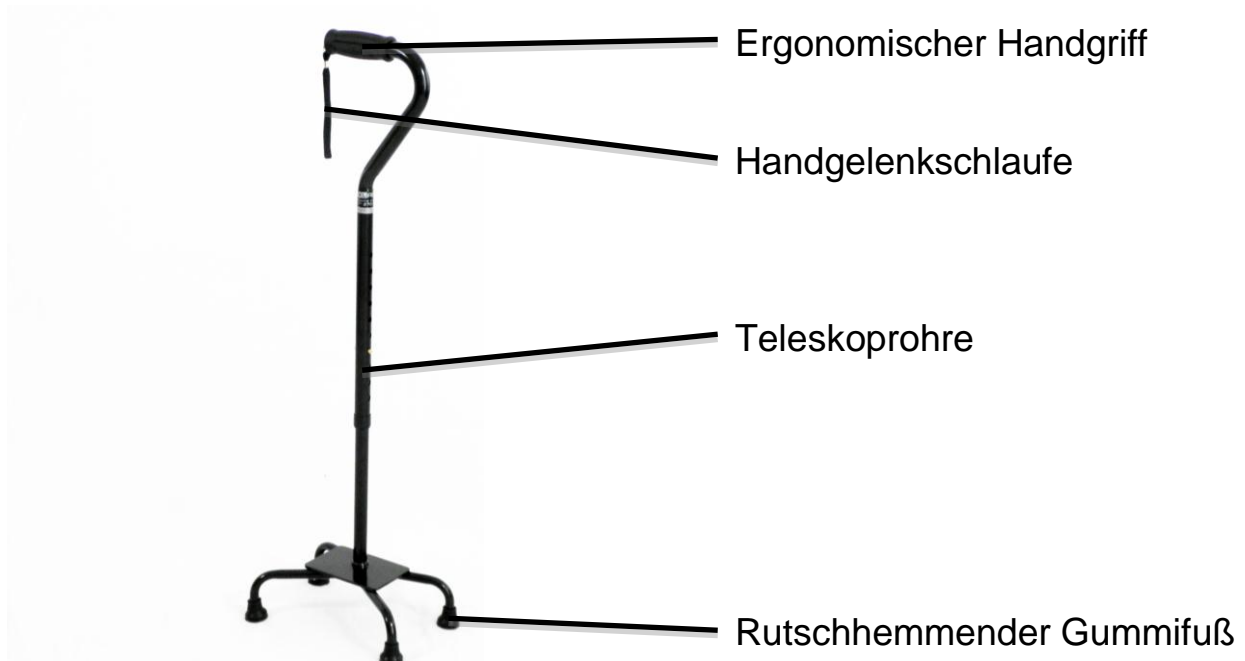


Abb. 1

Kennzeichnung und Typenschilder

Typen- und Herstellerschild sind am Teleskoprohr angebracht.



Schilder müssen lesbar bleiben. Unlesbare oder fehlende Schilder unverzüglich ersetzen. Das Typenschild ist für die Identifizierung des Produktes sehr wichtig. Es darf nicht entfernt werden.


Grundeinstellungen

Höhenverstellung



Die Stockhöhe wird generell vom Fachhandel angepasst und auf die jeweilige Körpergröße eingestellt. Falsch eingestellte Gehhilfen können die Funktionsfähigkeit der Gehhilfe einschränken oder zur Überlastung des Patienten führen.

Sie können die Höhe der Gehhilfe auch selbst anpassen.

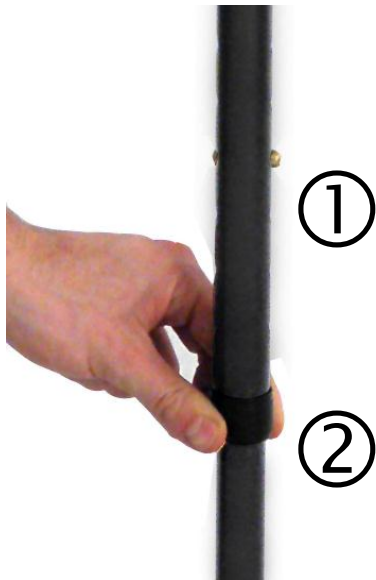

Dazu ist zuerst die Überwurfmutter ② zu lösen, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Anschließend drücken sie den Druckknopf ① hinein und ziehen die Teleskoprohre auseinander bzw. schieben sie zusammen bis die gewünschte Höhe erreicht ist.

Achten Sie darauf, dass der Druckknopf ① hörbar einrastet.

Ziehen Sie anschließend die Überwurfmutter ② wieder fest an.

Prüfen Sie vor dem ersten Benutzen die Gehhilfe auf Ihre Stabilität

Abb. 2

Anpassen für Linkshänder und Rechtshänder



Abb. 3: Rechtshänder



Abb. 4: Linkshänder

Der ergonomische Griff der Vierfußgehilfe XXL ist sowohl für Links als auch für Rechtshänder geeignet.

Sie müssen die Standfüße so verstellen, dass der herausragende Teil außen ist. Dazu müssen Sie wie in dem Kapitel *Höhenverstellung* beschrieben die Überwurfmutter lösen und den Druckknopf hinein drücken. Nun können Sie das Teleskoprohr der Standfüße um 180° nach außen drehen. Achten Sie auch hier drauf, dass der Druckknopf hörbar einrastet und ziehen Sie die Überwurfmutter wieder fest an.

Benutzung



Achtung! Kipp- und Abrutschgefahr!

Lassen Sie sich vom Fachpersonal die Benutzung der Gehhilfe erläutern. Nachfolgend finden Sie einige wichtige Hinweise:

Die Benutzung der Gehhilfe erfordert am Anfang etwas Übung. Lassen Sie sich ggf. von einer Hilfsperson unterstützen. Benutzen Sie die Stütze immer auf der Seite, die sich gegenüber des verletzten oder des zu schonenden Beins befindet. Halten Sie den Griff der Gehhilfe mit der ganzen Hand fest. Die Gehhilfe immer senkrecht und nicht zu weit vom Körper entfernt mit allen vier Füßen aufsetzen und versuchen Sie angemessene kleine Schritte machen.



Bei der Benutzung einer Gehhilfe kann für bestimmte Körperpartien eine ungewöhnlich hohe Belastung entstehen. An Händen, Armen oder Kleidungsstücken können Druck- oder Scheuerstellen auftreten. Es wird dann die Benutzung von optionalen Griffpolstern oder Handschuhen empfohlen.



Beim Treppensteigen ist es empfehlenswert sich mit der freien Hand am Treppengeländer fest zu halten. Versuchen Sie Treppen ohne Geländer zu vermeiden.



Achtung Stolpergefahr!

Bei der Benutzung der Gehhilfe ist drauf zu achten, dass sich die ausgestellten Füße der Gehhilfe auf der Außenseite befinden.

Transport und Zerlegen

Zum Versand auf Reisen oder einfach nur um Platz zu schaffen, kann die Gehhilfe in zwei Teile zerlegt werden. Dazu müssen Sie wie in dem Kapitel *Höhenverstellung* beschrieben die Überwurfmutter lösen und den Druckknopf hinein drücken. Ziehen anschließend die Teleskoprohre auseinander.

Für die anschließende Montage drücken Sie die Druckknöpfe hinein und schieben die Teleskoprohre wieder zusammen. Achten Sie auch hier drauf, dass der Druckknopf hörbar einrastet und ziehen Sie die Überwurfmutter wieder fest an.

Pflegehinweise für den Benutzer

Reinigung

Die Gehhilfe kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden.

Zum Desinfizieren von Rahmen und Griff benutzen Sie bitte ein Desinfektionsmittel auf alkoholischer Basis.



Verwenden Sie keinen Hochdruck- oder Dampfreiniger!

Weitergabe / Wiedereinsatz

Bei der Weitergabe / Wiedereinsatz der Gehhilfe denken Sie bitte daran, sämtliche für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen, dem neuen Nutzer zu übergeben.

Die Gehhilfe muss gereinigt, desinfiziert und durch den Fachhandel auf Schäden hin untersucht und freigegeben werden.

Überprüfung der Gehhilfe durch den Benutzer

Überprüfen Sie vor jeder Benutzung

- die Unversehrtheit und Sauberkeit der Gehhilfe. Ist sie verschmutzt, können Sie es gemäß Reinigungshinweisen reinigen. Ist sie beschädigt, kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.
- alle Schraub- und Schweißverbindungen auf Unversehrtheit.

Wartungshinweise für den Fachhandel

Wir empfehlen mindestens einmal im Jahr Gehhilfe einer Inspektion durch den Fachhandel zu unterziehen. Bei Störungen oder Defekten der Gehhilfe ist diese unverzüglich zu ersetzen.



Für Fragen steht Ihnen der Dietz Kundenservice unter der Rufnummer +49 (0) 7248/ 9186 - 0 zur Verfügung.



Verwenden Sie bitte das beiliegende Wartungsprotokoll um den Wartungsstatus der Gehhilfe im Überblick zu behalten.

Entsorgung

Wenn Ihre Gehhilfe nicht mehr verwendet wird und entsorgt werden soll, erkundigen Sie sich bei ortsansässigen Entsorgungsunternehmen über die Vorschriften.

Technische Daten

Vierfußgehhilfe XXL	
Farbe	Schwarz
Griffhöhe cm	71-93
Max. Belastbarkeit kg	270
Gewicht kg	1,5
Material	Pulverbeschichteter CrMo Stahl
Aufstandsfläche	30cm x 20cm
Artikel-Nr.	10106
Preis	Auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten

Wartungsprotokoll

(Verwenden Sie nach Möglichkeit die am Seitenende angegebenen Wartungskürzel beim Ausfüllen der Spalte)

Wann												
Was												
Griff												
Teleskoprohre, allgemein												
Mechanik												
GummifüÙe												
Wer												

G = geprüft E = ersetzt R = repariert

Garantie

Garantieleistungen beziehen sich auf alle Mängel des Produkts, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Zugang der Versandbereitschaftsanzeige, spätestens jedoch nach Auslieferung. Von der Gewährleistungspflicht ausgeschlossen sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Desgleichen gilt bei Verwendung von ungeeigneten Pflegemitteln, Schmierölen bzw. Fetten. Bei Beanstandungen ist der vollständig ausgefüllte Garantie-Abschnitt (siehe unten) mit einzureichen.



Garantie- Abschnitt

Produkt:

Modellbezeichnung

Seriennummer

Fachhändler:

Datum und Stempel

Senden an:

DIETZ[®]
REHA-PRODUKTE

Descostrasse 10
D-76307 Karlsbad-Ittersbach