

Sicherheitshinweise

- Hängen Sie keine Taschen an die Griffe.
- Beim Benutzen auf abschüssigen Wegen kann die Rollgeschwindigkeit höher werden als die eigene Schrittgeschwindigkeit; benutzen Sie dann die Betriebsbremse.
- Benutzen Sie den Rollator nur auf ebenen horizontalen und festen Untergrund.
- Beim starken Aufstützen auf die Handgriffe kann der Rollator nach hinten kippen.
- Beim Zusammenklappen des Rollators Arthritis können Kleidungs- oder Körperteile eingeklemmt werden.

Reinigung

Die Reinigung und Desinfektion sollten Sie in regelmäßigen Abständen (bei Benutzerwechsel zwingend erforderlich) durchführen. Zur Reinigung verwenden Sie eine milde Seifenlauge ohne Scheuerzusätze. Die Desinfektion können Sie mit handelsüblichen Mitteln durchführen. Verwenden Sie keine Dampfstrahlgeräte und keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel!

Wartung

Der Rollator Arthritis ist wartungsfrei. Wenn Sie ein Nachlassen der Bremsen, Schwergängigkeit der Räder oder andere Funktionseinschränkungen feststellen werden, ist Rollator für eine Instandsetzung dem Fachhandel zu übergeben.

Lieferumfang

- Rollator Arthritis
- Einkaufskorb
- Tablett
- Gebrauchsanweisung und Werkzeugset

Garantie

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate und bezieht sich auf alle Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

Technische Daten

Maximale Zuladung:	120 kg
Leergewicht:	13 kg
Gesamtbreite:	605 mm
Gesamttiefe:	710 mm
Gesamthöhe:	1145 – 1315 mm
Wenderadius:	900 mm
Abstand zwischen den Handgriffen:	420 mm
Sitzhöhe:	610 mm
Verstellungen:	Armpolster: 980 – 1150 mm Griff/Unterarm: 270 – 360 mm
Bereifung:	∅ 188 x 48 mm, pannensicher

Stand: 09/2009/Rev.4

Gebrauchsanweisung

Rollator Arthritis



Allgemeines

Für den hier beschriebenen Rollator Arthritis ist die Konformität gemäß der EG-Richtlinie 93/42, für Medizinprodukte, erklärt.

Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Lieferumfangs.

Sie ist beim Benutzer bereitzuhalten und bleibt auch bei Weitergabe des Produktes beim Produkt.

Änderungen durch technische Weiterentwicklungen gegenüber den in dieser

Gebrauchsanweisung dargestellten Ausführung behalten wir uns vor.

Nachdrucke, Übersetzungen und Vervielfältigungen in jeglicher Form, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Herstellers.

Das Urheberrecht liegt beim Hersteller.

Diese Gebrauchsanweisung unterliegt keinem Änderungsdienst. Den jeweils aktuellen Stand erfahren Sie bei uns.

Indikation und Verwendungszweck

Der Rollator Arthritis dient bewegungseingeschränkten Personen mit max. 120 kg Körpergewicht als Gehhilfe und eingeschränkt auch als Sitzgelegenheit zum vorübergehenden Ruhen.

Der unter der Sitzfläche eingehängte Drahtkorb ist zur Ablage und zum Transport von Gegenständen oder Waren vorgesehen.

Der Rollator Arthritis darf nur auf festem und ebenem Untergrund verwendet werden.

Die Benutzung zu anderen Zwecken, insbesondere die Verwendung als Aufstieghilfe oder zum Transportieren schwerer Lasten ist bestimmungswidrig und gefährlich!

Aufstellen / Entfalten des Rollators

- Positionieren Sie den Rollator vor sich in Fahrrichtung
- Stecken Sie die Rohre mit den Armauflageschalen in die Rahmenrohre bis in die unterste Position und Verschrauben diese (Achten Sie darauf, dass die Krümmung nach oben/vorn zeigt)
- Nun stecken Sie die Handgriffe unter die Armauflageschalen und ziehen diese fest an.
- Betätigen Sie die Feststellbremse durch Druck nach vorn
- Richten Sie den Rollator nun so auf, dass die Lenkräder entlastet werden
- Durch leichten Druck auf die Armpolster klappt der Rollator auseinander
- Um den Klappmechanismus zu arretieren, drücken Sie mit der flachen Hand den Sitz nach unten
- Jetzt aktivieren Sie die zusätzliche Faltsperre durch Herunterdrücken.



Falten des Rollators

- Positionieren Sie dazu den Rollator in Fahrrichtung vor sich und betätigen Sie die Feststellbremsen
- Lösen Sie die Faltsperre
- Kippen Sie den Rollator zu sich heran und Halten Sie mit beiden Händen den Rollator an den Armpolstern
- Ziehen Sie nun den Rollator zu sich nach oben und falten Sie den Rollator

Schiebegriff und Armpolster einstellen

- Betätigen Sie als Erstes die Feststellbremse
- Lösen Sie die Klemmschrauben am Rahmenrohr und ziehen Sie diese ganz heraus
- Positionieren Sie die Armpolster in der gewünschten Höhe
- Anschließend sind die Klemmschrauben wieder fest anzuziehen



- Um die Handgriffe einzustellen Lösen Sie die Klemmschrauben unter der Armpolsterung
- Positionieren Sie die Griffrohre in der gewünschten Tiefe
- Achten Sie auf die max. Auszugsbegrenzung und ziehen Sie die Klemmschraube wieder fest an



Betriebs- und Feststellbremse

- Die Bremse wird als Betriebsbremse (beim Schieben), durch ziehen des Bremshebels verwendet
- Durch Drücken des Hebels nach vorn wird die Bremse als Feststellbremse (beim Parken) verwendet



Bremseinstellung

- Die Bremswirkung kann direkt am Bremshebel oder am Bowdenzug eingestellt werden Die Bremse ist korrekt eingestellt, wenn die Bremshebel wie auch die Bowdenzüge kein Spiel aufweisen und die Räder sich ohne Schleifgeräusche drehen lassen