

Reinigung

Die Reinigung und Desinfektion sollten Sie in regelmäßigen Abständen durchführen. Zur Reinigung verwenden Sie eine milde Seifenlauge ohne Scheuerzusätze. Die Desinfektion können Sie mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel welches für Kunststoffe zugelassen ist durchführen.

Wartung

Das Badewannenbrett ist wartungsfrei. Sollte das Brett defekte aufweisen wenden Sie sich an den Fachhändler oder Ihren Service zum Austausch des Produktes.

Lieferumfang

- Badewannenbrett mit Klemmzapfen
- Haltegriff
- Gebrauchsanweisung
- Verpackungs- und Transportkarton

Garantie

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate und bezieht sich auf alle Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

Technische Daten

	Modell 74 cm	Modell 69 cm
Maximale Zuladung:	150 kg	
Gesamtbreite:	350 mm	
Gesamthöhe:	40 mm	
Gesamthöhe (inkl. Griff):	160 mm	
Gesamtlänge:	740 mm	710 mm
Gesamtlänge (inkl. Griff):	760 mm	690 mm
Gewicht:	2,7 kg	2,2 kg
Sitzfläche:	590 x 240 mm	510 x 240 mm
Wanneninnenabmessung:	380 – 650 mm	300 – 530 mm

Stand: 01/2008/Rev.0.1

Gebrauchsanweisung

Badewannenbrett Santilo



Allgemeines

Für das hier beschriebene Badewannenbrett Santilo erklärt die Dietz GmbH die Konformität gemäß der EG-Richtlinie 93/42 für Medizinprodukte. Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Lieferumfangs. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Benutzung des Badewannenbretts genau durch und befolgen Sie die Hinweise. Sie ist durch den Benutzer bereitzuhalten. Änderungen durch technische Weiterentwicklungen gegenüber den in dieser Gebrauchsanweisung dargestellten Ausführungen behalten wir uns vor. Nachdrucke, Übersetzungen und Vervielfältigungen in jeglicher Form, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Herstellers. Das Urheberrecht liegt beim Hersteller. Diese Gebrauchsanweisung unterliegt dem Änderungsdienst. Den jeweils aktuellen Stand erfahren Sie bei uns.

Indikation und Verwendungszweck

Das Badewannenbrett Santilo ermöglicht behinderten Personen auf der Höhe des Wannenrandes sitzend die Vorgänge der Körperreinigung (Duschen) und des Abtrocknens durchführen zu können.

Die Verwendung des Badewannenbretts ist angezeigt bei erheblicher Funktionsminderung oder fehlender Funktionsfähigkeit der unteren Extremitäten (z.B. Amputationen, Lähmungen, Gelenkerkrankungen, neuromuskuläre Erkrankungen mit Beeinträchtigung der Extremitäten), wenn selbständiges Ein- und Aussteigen aus der Badewanne bzw. Hin- und Aufsetzen nicht mehr möglich ist, die Rumpfkontrolle und Gebrauchsfähigkeit der oberen Extremitäten aber noch ausreichend vorhanden sind.

Sicherheitshinweise

- Bitte benutzen Sie, falls erforderlich zum Ein- und Aussteigen sowie Waschen und Duschen eine Hilfsperson, sofern Sie sich selbst nicht ausreichend halten können.
- Achtung Klemmgefahr! Beim Einstellen der Klemmzapfen.
- Achten Sie auf den korrekten Sitz. Das Badewannenbrett muss sicher gegen Verrutschen eingepasst und montiert sein.
- Neigen Sie Ihren Oberkörper nicht übermäßig hin und her. Das Badewannenbrett könnte sich vom Wannenrand lösen!
- Achten Sie darauf, dass der Handgriff fest verschraubt ist.

Das Badewannenbrett ist ausschließlich für den angegebenen Verwendungszweck und nur von einer Person in der Wanne zu benutzen.

Montage


- Schrauben Sie die Klemmzapfen und den Haltegriff mit den beiliegenden Schrauben am Badewannenbrett fest.



Montage in der Badewanne

Das Badewannenbrett kann auf üblichen Badewannen auf den Wannenrand aufgelegt und befestigt werden. Diese Einstellung wird in der Regel durch den Fachhandel vorgenommen. Wenn Sie die Einstellung/Befestigung selbst durchführen gehen Sie wie folgt vor.

- Lösen Sie die Klemmzapfen an der Unterseite des Badewannenbrettes (nicht komplett abschrauben).
- Legen Sie das Badewannenbrett mittig auf den Wannenrand und achten Sie darauf, dass die rutschhemmenden Gummipads rechts und links auf dem Wannenrand aufliegen.
- Schieben Sie die Klemmzapfen gleichmäßig an den Wanneninnenrand und ziehen Sie diese fest an.

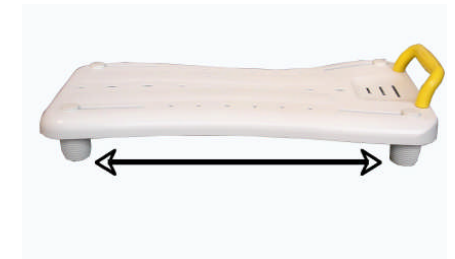

Bedienung

Das Badewannenbrett ist so auf den Wannenrand aufzulegen, dass der Haltegriff sich an der gegenüber der Einstiegseite befindet. Zum Hinsetzen/Einsteigen setzen Sie sich von der Seite auf das Badewannenbrett und drehen sich in die Wanne hinein. Sofern Sie sich selbst nicht ausreichend halten können nehmen Sie die Hilfe einer Betreuungsperson an.