

Toilettensitzerhöhung 10 cm mit Deckel/ ohne Deckel

Modell: 800110 und 800160

Herzlichen Glückwunsch ! Vielen Dank für den Kauf einer eureha Toilettensitzerhöhung. Sie haben sich für ein Produkt „Made in Germany“ entschieden, das auch Sie durch seine Qualität, Design und Funktionalität überzeugen wird. Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen beim Umgang mit Ihrer Toilettensitzerhöhung helfen. Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und probieren Sie einmal die Funktionen dieser Toilettensitzerhöhung wie beschrieben aus, damit Sie sich besser vertraut machen und mehr Mobilität mit Sicherheit und Komfort erfahren.

Sicherheitshinweise

- **Max. Belastung 200 kg!**
- **Vor jedem Gebrauch Toilettensitzerhöhung auf festen Sitz auf dem Toilettenbecken prüfen.**
- **Bei nassem Gesäß - insbesondere in Verbindung mit Seife - besteht u.U. Rutschgefahr - trocknen Sie das Gesäß vor dem Toilettengang.**
- **Benutzen Sie das Hilfsmittel nicht, wenn Sie Beschädigungen an der Sitzauflage feststellen.**
- **Setzen Sie das Hilfsmittel keinen höheren Temperaturen als + 85° C aus.**
- **Beachten Sie bitte vor der Montage der Toilettensitzerhöhung auf wandhängende Toilettenbecken, um das zulässige max. Belastungsgewicht Ihres Toilettenbeckens nicht zu überschreiten!**

Empfangskontrolle

Kontrollieren Sie beim Empfang den Inhalt auf Vollständigkeit und das Produkt sorgfältig auf Transportschäden.

Inhalt:

- Bedienungsanleitung mit Spannelementen
- Toilettensitzerhöhung 10 cm

Beschreibung

Mit Hilfe dieser Toilettensitzerhöhungen wird die Sitzfläche um ca. 10 cm erhöht. Das Befestigungssystem gewährleistet eine sichere, individuell anpassbare Fixierung auf dem Toilettenbecken.

Die Toilettensitzerhöhung ist mit Deckel (800110) und ohne Deckel (800160) lieferbar.

Montage

1. Setzen Sie die Toilettensitzerhöhung mittig auf das Toilettenbecken und legen Sie den vorderen Anschlag an der vorderen Aussenkante des Toilettenbeckens an.
2. Spannelemente bis zum Anschlag einführen
3. Die Befestigungsschrauben im Uhrzeigersinn drehen, bis die Toilettensitzerhöhung fest auf dem Toilettenbecken verankert ist
4. Prüfen Sie nun, ob die Toilettensitzerhöhung fest und sicher auf dem Toilettenbecken aufliegt.

Demontage

Zur Demontage verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.

Reinigung

Die Toilettensitzerhöhung ist mit handelsüblichen Putz- bzw. Desinfektionsmitteln zu reinigen. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.

Die Toilettensitzerhöhung ist spritzwassergeschützt.

Entsorgung

Die Geräteverpackung wird der Wertstoffwiederverwertung zugeführt. Die Metallteile werden der Altmetallverwertung zugeführt. Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen. Erfragen Sie bitte bei der Stadt-/ Gemeindeverwaltung nach örtlichen Entsorgungsunternehmen.

Reparaturen

Verwenden Sie ausschliesslich EUREHA - Originalersatzteile.

Maximale Belastung

Das Produkt darf mit max. 200 kg belastet werden.

Abmaße

	800110	800160
Breite:	370 mm	368 mm
Höhe:	100 mm	100 mm
Tiefe:	400 mm	400 mm
Öffnung:	277 mm	277 mm
Gewicht:	1,45 kg	1,03 kg

Stand: 1.2004/ EUREHA GmbH

eureha GmbH

Rehabilitationstechnik

Raiffeisenstrasse 17

D-88353 Kisslegg, Germany

Telefon +49 (0)7563 90 84-64

Telefax +49 (0)7563 90 84-65

info@eureha.de

www.eureha.de



Dieses Produkt ist konform mit der
EG - Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.