

Toilettensitzerhöhung mit Armlehnen/ ohne Armlehnen

Modell: 700110 und 700160

Sie haben ein **eureha** - Produkt gewählt. Wir beglückwünschen Sie zu dieser Wahl und sind sicher, daß Ihnen das Hilfsmittel mehr Mobilität und damit gute Dienste leisten wird. Jedes unserer Produkte wird nach strengen Qualitätsrichtlinien gefertigt. Während der Produktion durchläuft das Produkt mehrere Prüfungen. Vor Versand erfolgt eine Endabnahme.

Empfangskontrolle

Packen Sie das Produkt bitte vollständig aus und prüfen Sie die Sendung auf Vollständigkeit. Prüfen Sie die Sendung sorgfältig auf Transportschäden.

Sollten Sie feststellen, daß dieses Produkt oder die Sendung Fehler aufweist:

- so reklamieren Sie unverzüglich beim Frachtführer
- lassen Sie den Schaden protokollieren
- informieren Sie uns.

Montage bei Modell 700160 (ohne Armlehnen)

Die Toilettensitzerhöhung kann auf den meisten handelsüblichen Toilettenbecken eingesetzt werden. Die Erhöhung ist in drei Stufen einstellbar (8/10 u. 13 cm). Vor der Montage stellen Sie bitte die gewünschte Sitzhöhe durch verdrehen/umschrauben der unterseitig montierten Höhenverstellstangen ein (3 Stufen). Achten Sie darauf, daß die Höhenverstellstangen sicher eingerastet/verschraubt sind. Am hinteren Teil befinden sich unten zwei Stangen mit Gewinde. Stellen Sie den Abstand dieser Stangen passen auf den Lochabstand der Toilette ein. Führen Sie die Schrauben in die Bohrung des Toilettenbeckens ein. Schieben Sie nun je einen Schnellverschluß auf eine der Stangen nach oben gegen die Keramik und drehen diese handfest an. **(siehe Montage u. Demontage SOLIDCLIP)**. Achten Sie bei der Montage darauf, daß die Toilettensitzerhöhung exakt zur Toilette vermittelt ist. Ihr WC ist nun wieder einsatzbereit.

Montage bei Modell 700110 (mit Armlehnen)

Vor der Montage stellen Sie bitte die gewünschte Sitzhöhe durch verdrehen/verschrauben der unterseitig montierten Höhenverstellstangen ein (3 Stufen). Achten Sie darauf, daß die Höhenverstellstangen sicher eingerastet/verschraubt sind. Am hinteren Teil befinden sich unten zwei Stangen mit Gewinde. Stellen Sie den Abstand dieser Stangen passen auf den Lochabstand der Toilette ein. Führen Sie die Schrauben in die Bohrung des Toilettenbeckens ein. Schieben Sie nun je einen Schnellverschluß auf eine der Stangen nach oben gegen die Keramik und drehen diese handfest an. **(siehe Montage u. Demontage SOLIDCLIP)**. Achten Sie bei der Montage darauf, daß die Toilettensitzerhöhung exakt zur Toiletten vermittelt ist. Stecken Sie nun die linke und rechte Armlehne in das Aufnahmerohr seitlich im hinteren Bereich. Achten Sie darauf, daß die Armlehnen sicher durch die Federverschlüsse eingerastet sind. Die Armlehnen können unabhängig voneinander nach hinten geklappt werden. **In der senkrechten Stellung werden die Armlehnen automatisch entriegelt und können abgenommen werden!**

Sitzbrille mit Deckel können zum Austausch leicht entfernt und montiert werden. Dazu klappen Sie bitte Brille und Deckel im 70° Winkel nach oben. Fassen Sie dann links und rechts in die seitlich vorhandenen Vertiefungen. Nun können Sie Brille mit Deckel nach oben abziehen.

Abmaße

Breite: 54 cm
Höhe: 36 cm
Tiefe: 52 cm

Sicherheitshinweise

- **Max. Belastung 130 kg!**
- **Die Armlehnen (bei Modell 700110) dürfen nur gleichmäßig belastet werden und sollen nur zur Unterstützung verwendet werden.**
- **Bei nassem Gesäß - insbesondere in Verbindung mit Seife - besteht u.U. Rutschgefahr - trocken Sie das Gesäß vor dem Toilettengang.**
- **Achten Sie darauf, daß die Höhenverstellstangen sicher eingerastet/verschraubt sind.**
- **Stellen Sie sicher, daß die Toilettensitzerhöhung immer fest mit dem WC-Becken verschraubt ist.**
- **Benutzen Sie Das Hilfsmittel nicht, wenn Sie Beschädigungen an der Sitzauflage feststellen.**
- **Setzen Sie das Hilfsmittel keinen höheren Temperaturen als + 85° C aus.**

Reinigung

Zum Reinigen verwenden Sie eine Seifenlösung. Das Reinigungsmittel sollte einen ph-Wert von min. 6 aufweisen. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.

Reparaturen

Verwenden sie ausschließlich EUREHA - Originalersatzteile. Bedienen Sie sich der Serviceleistungen Ihres geschulten Fachhändlers.

Maximale Belastung

Das Produkt darf mit max. 130 kg belastet werden.

Stand: 11.2003/ EUREHA GmbH

eureha GmbH
Rehabilitationstechnik
Raiffeisenstrasse 17
D-88353 Kisslegg, Germany

Telefon +49 (0)7563 90 84-64
Telefax +49 (0)7563 90 84-65
info@eureha.de
www.eureha.de



Dieses Produkt ist konform mit der EG - Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

Funktionsweise des SOLIDCLIP

Montage

Drücken Sie das bewegliche Innenteil des SOLIDCLIP nach vorne und fassen Sie diesen am hinteren Ende (siehe Abb.). Drücken Sie ihn leicht zusammen.



Schieben Sie nun den SOLIDCLIP auf die Gewindestange bis zum Anschlag der Toilettenkeramik.



Drücken Sie jetzt das bewegliche Außenteil nach oben, die beweglichen Teile des SOLIDCLIP werden zusammengeschoben.



Jetzt können Sie die Toilettensitzerhöhung handfest am Toilettenbecken verschrauben.

Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen den festen Sitz der Verschraubung!

Demontage

Zur Demontage der Toilettensitzerhöhung verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.

Drehen Sie dazu den SOLIDCLIP einige Umdrehungen nach links, fassen dann den SOLIDCLIP im oberen Bereich (siehe folgende Abb.) und ziehen wieder auseinander.



Jetzt kann der SOLIDCLIP ganz von der Gewindestange abgezogen werden und die Toilettensitzerhöhung ist demontiert.

Der SOLIDCLIP ist wieder für die nächste Montage einsetzbar.